

Provtagningsanvisning Norovirus (Calici) - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Norovirus (Calici)	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Norovirus (Calici)

Remiss	Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Feces. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg)
Provtagning	Fecesburk med sked, provmaterial 1-2 ml 
Förvaring/transport	Transporteras snarast till laboratoriet, analys bör ske inom 2 dygn från provtagning. Förvaras kylt i väntan på transport
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk mikrobiologi Gävle sjukhus samt Klinisk kemi Hudiksvall och Bollnäs sjukhus
Referensintervall	Norovirus genogrupp I Påvisat/Ej påvisat Norovirus genogrupp II Påvisat/Ej påvisat
Svarstid	Utförs dagligen 8-16, svarstid inom denna tidsram är 2-4 timmar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt.
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Metoden sker genom nukleinsyrapåvisning (PCR) Norovirus GI- och norovirus GII utförs alltid tillsammans. Hygieniska åtgärder för att förhindra spridning av norovirus bör vidtagas. Kontakta Vårdhygien. Observera att Benzalkolium-klorid eller barium-sulfat i feces kan ge falskt negativt resultat Lägre känslighet av G.I.3 kan förekomma, vilket har observerats i externa utskick. Feces är rekommenderat provmaterial, men virus kan även påvisas i kräkning(ej ackrediterat provmaterial).
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstanke om viral gastroenterit. Epidemiologisk övervakning.

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Vid behov av kommunikering om ändringar i dokumentet utses relevanta kvalitetssamordnare som extra uppföljare på dokumentet. Dessa ansvarar sedan för att ändringarna kommuniceras inom berörda verksamhetsområden.

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvarig samt granskad av medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2026-03-17	1	Nytt dokument anpassat utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätts av dok. 09-399696. Ändrar till journalsystem Cosmic och lägger till sökväg i Cosmic. Uppdaterat text under rubrik förvaring/transport att analys bör ske inom 2 dygn från provtagning och även under rubrik kommentar/övrig upplysning: Observera att Benzalkolium-klorid eller barium-sulfat i feces kan ge falskt negativt resultat samt att lägre känslighet av G.I.3 kan förekomma, vilket har observerats i externa utskick.