


Provtagningsanvisning Kreatinin, Syst- Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg (skriv för hand under dialysat alternativt övriga analyser)
Provtagning	Övriga kroppsvätskor: Na- eller Li -Heparinrör utan gel, mörkgrön propp 
Förvaring/transport	Transport till analyserande lab samma dag. Provet centrifugeras på Klinisk kemi före analys. Centrifugerat prov hållbart 7 dygn i rumstemperatur 7 dygn i kyl 3 månader i frys
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall
Referensintervall	Referensintervall för Kreatinin i diversevätskor saknas.
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Ej tillämpligt
Medicinsk bakgrund/indikation	Vid misstanke om urinläckage.

Revideringar

Datum	Revisionsnummer	Ändring
2022-09-26	5	Återaktivering. Lagt till rubriken revideringar.
2024-10-02	6	Ändrat under Provtagning, tog bort plaströr sterilt med skruvkork (gul).
2025-02-07	7	Ändring av titel enligt harmonisering av benämning utifrån rekommenderat rapportnamn, tidigare Provtagningsanvisning D-Kreatinin i övriga kroppsvätskor - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet