

Provtagningsanvisning Svampodling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Svampodling	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Svampodling

Remiss	Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Svampdiagnostik. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg) Ange kliniska data, eventuell immunosuppression samt eventuell antimykotikabehandling. OBS! Vid misstanke på infektion med <i>Blastomyces</i>, <i>Coccidioides</i>, <i>Cladophialophora bantiana</i>, <i>Histoplasma</i>, <i>Paracoccidioides</i> eller <i>Rhinocladiella</i> måste detta anges på remissen och provet vidarebefordras till annat laboratorium med säkerhetsklass 3; Karolinska sjukhuset.
Provtagning	Jästsvamp och Aspergillus <u>Provtagningslokal:</u> Sår, feces, konjunktivalsekret, hörselgång, mun/svalg, tunga, uretra, cervix och vagina. <u>Provtagningsmaterial:</u> Provtagningspinne CP480CE regular E-Swab rosa (artikelnummer 201515), Provtagningspinne CP483CE Uretra E-Swab orange (artikelnummer 201514). <u>Provtagningslokal:</u> Nedre luftvägar (t.ex. sputum, BAL, trachealsekret, bronksköljvätska), urin, sterila punktat, bröstmjölk och abscesser. <u>Provtagningsmaterial:</u> Rör rund botten skruvlock 10 ml (artikelnummer 1159356). <u>Provtagningslokal:</u> Esofagusbiopsi <u>Provtagningsmaterial:</u> Rör rund botten skruvlock 10 ml (artikelnummer 1159356), tillsätt några droppar koksaltlösning som förhindrar uttorkning. <u>Provtagningslokal:</u> Blod, se Provtagningsanvisning Blododling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg <u>Provtagningslokal:</u> Keratitis, se Provtagningsanvisning Keratitodling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

	<u>Övriga frågeställningar:</u> Dermatofyter (ringorm/tinea), direktmikroskopi och svampfrågeställning i likvor, vävnadsbit/biopsi (exklusive esofagus) samt Malassezia (pityriasis, seborroiskt eksem mfl) skickas till Akademiska laboratoriet
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk mikrobiologi, Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Preliminärsvaret tidigast: Efter ett dygn Slutsvaret tidigast: Efter sju dygn Slutsvaret senast: Efter 4 veckor
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kompletterande resistensbestämning kan efterbeställas upp till en vecka efter svar.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Resistensbestämning: Utförs alltid vid växt från blod och sterila lokaler, annars utförs resistensbestämning på begäran. I dessa fall skickas stammen till externt laboratorium.
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstanke på jästsvamp eller Aspergillus infektion.

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvariga samt granskad av medicinskt ansvariga.

Instruktion

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Svampodling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

4(4)

Dokument ID: 09-899399

Giltigt t.o.m.: 2027-01-16

Revisionsnr: 1

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-12-11	1	Nytt dokument utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok. 09-202769. Ändrar till journalsystem Cosmic och lägger till sökväg i Cosmic. Lagt till länk till karolinska. Korrigerat informationen under rubrik provtagning.