

Provtagningsanvisning *Helicobacter pylori* - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Antigen i faeces

Remiss	Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2 Mikrobiologi Laboratoriemedicin Region Gävleborg)
Provtagning	Faecesburk med sked 0,5 g (2 skedar) färsk avföring
Förvaring/Transport	Provet kan förvaras i rumstemperatur och skickas inom två dygn. Efter tre dygn skall provet förvaras i 4-8°C. Vid längre transporttid/förvaring skall provet frysas i -20°C.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Analysen utförs 1-2 gånger per vecka.
Ackrediterad	Ja
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	För att undvika falskt negativt resultat ska prov tas tidigast 2 veckor efter utsättande av protonpumpshämmare och 4 veckor efter avslutad antibiotikabehandling. Påvisat <i>Helicobacter pylori</i> antigen föranleder inte i sig eradikeringsförsök. Testresultatet ska tolkas tillsammans med kliniska data och/eller andra diagnostiska undersökningar. Svarstolkning: <i>Helicobacter pylori</i> antigen påvisat/ej påvisat/gränsvärde Tilläggsundersökning: Faecesodling, <i>C.difficile</i> eller Norovirus.
Medicinsk bakgrund/Indikation	Misstanke om <i>Helicobacter pylori</i> -infektion.

Revideringar

Datum	Revisions nummer	Ändring
2022-12-13	6	Lagt till rubriken revideringar
2023-11-21	7	Ändrat att analysen utförs 1-2 gånger i veckan samt att svarsalternativ "gränsvärde" kan förekomma
2024-10-08	8	Ny upprättare, slutgranskare och fastställare.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet