


Provtagningsanvisning Chlamydia pneumoniae/Mycoplasma pneumoniae PCR - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Duplex realtids PCR

Remiss	Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2 Mikrobiologi Laboratoriemedicin Region Gävleborg)
Provtagning	E-swabrör med flockad provtagningspinne Sökord i Proceedo: <i>E-swab</i>  Lämpligast tas skrap från bakre svalgvägg. Prov kan även tas från nasopharynx, sputum, bronkialsköljvätska eller pleuravätska.
Förvaring/Transport	Förvaras kylt i väntan på transport. Transporteras i rumstemperatur och skall då nå laboratoriet inom 24 timmar, om detta ej är möjligt ska provet förvaras kallt.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämplig
Svarstid	Proverna analyseras tre gånger i veckan.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämplig
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Då patogenerna är svåra att skilja utifrån symptombild utförs alltid båda analyserna samtidigt från ett och samma prov.

Medicinsk bakgrund/Indikation	Misstanke om C. pneumoniae respektive M. pneumoniae infektion, långdragen övre eller nedre luftvägsinfektion, atypisk pneumoni.
----------------------------------	---

Revideringar

Datum	Revisions nummer	Ändring
2022-09-13	9	Lagt till rubrik revideringar. Förtydligande av hänvisning under remiss
2023-09-30	10	Ny fastställare

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatum