

## Provtagningsanvisning Sjukvårdsintegrerad Biobank (SIB) Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från Svarsdatabasen i Region Gävleborg
Provtagning	<p>Vilka av dessa prover som ska tas avgörs i respektive studie.</p> <p>EDTA helblod Biobank: 6 mL EDTA-rör, lila propp.</p>  <p>EDTA plasma Biobank: 6 mL EDTA-rör, lila propp.</p>  <p>Li-heparinplasma med gel Biobank: 8 mL Litium-Heparin-rör, mintgrön propp.</p>  <p>Serum med gel Biobank: 8 mL serumrör med gel, gul propp.</p>  <p>Serum utan gel Biobank: 7 mL serumrör utan tillsats, röd propp.</p>  <p>Citratplasma Biobank: 2 st. 5 mL Citrat-rör, ljusblå propp</p>  <p>Alla rör ska vara helt fyllda för att serum/plasma ska räcka till 8 alikvoter.</p>

Förvaring/transport	Provet skall vara omhändertaget på Klinisk kemi i Gävle inom 4 timmar. Hantering se <a href="#">Sjukvårdsintegrerad biobankning - Laboratoriemedicin</a>
Analyserande laboratorium	Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Ej tillämpligt
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Proverna tas på Gävle sjukhus om ingen annan överenskommelse finns.
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	Ej tillämpligt
Medicinsk bakgrund/indikation	Sjukvårdsintegrerad Biobank

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet