

Provtagningsanvisning SARS-CoV-2/Influensa A och B/RSV (PCR) akut – Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	<p>OBS! Denna analys ska endast beställas då akut beslutsunderlag behövs.</p> <p>Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen under Mikrobiologi, SARS-CoV-2/Influensa A och B/RSV (PCR) akut. (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg. Vid beställning på pappersremiss skriv ”akutanalys” i anamnesrutan, provmaterial och insjuknandedatum.)</p>
Provtagning	<p>I första hand rekommenderas att ett prov per patient tas från nasofarynx och bakre svalgvägg.</p> <p>Följande provtagningsmaterial accepteras: Flockad pinne i sterilt rör med 3 mL fysiologisk koksalt (använd samma pinne för provtagning av både npH och svalg) Vid brist på flockade pinnar kan E-swab användas. Alternativt kan nasofarynxaspirat tas. Prov tas i sterilt plaströr, i slemmsamlare med sug och tunn kateter.</p> <p>Artikel och artikelnummer: Flockad pinne, artikelnr 201508 (Proceedo) Sterilt plaströr med skruvkork, artikelnr 231202 (Proceedo) Virocult, artikelnr 201361 (Onemed) E-swab, blå, NPH, artikelnr 201520 (Proceedo) Sugset, artikelnr 215390 (Proceedo) Sugkateter, artikelnr 286345 (Proceedo) Sugslang med kona och nippel, artikelnr 220382 (Proceedo)</p>

Förvaring/transport	Transporteras snarast till laboratoriet. Förvaras kylt i väntan på transport. Transport utanför laboratoriet sker i kyla.
Analyserande laboratorium	Klinisk kemi Gävle sjukhus, Hudiksvalls sjukhus och Bollnäs sjukhus
Referensintervall	Påvisat/Ej påvisat
Svarstid	1 ½ - 2 timmar
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kontakta laboratoriet om detta önskas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	Metoden är en PCR där fyra virus detekteras samtidigt; SARS-CoV2, Influensa A, Influensa B och RS-virus. Analys av enskilda virus utförs ej med denna metod.
Medicinsk bakgrund/indikation	Indikation: Misstanke om infektion orsakad av SARS-CoV-2, Influensa A/B eller RSV.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-01-25	3	Lagt till rubriken revideringar
2023-10-25	4	Mindre justering i provtagning. Bytt upprättare och slutgranskare.
2024-10-18	5	Tagit bort virokult som alternativ till transportmedium