


## Provtagningsanvisning Kemiprofil i plasma - Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Region Gävleborg
Provtagning	5 mL Li-Heparin, gelrör, mintgrön propp  Kan tas kapillärt Minsta blodmängd ca 1 mL (300 µL plasma)
Förvaring/Transport	Centrifugera provet inom 4 timmar från provtagning Centrifugerat prov hållbart 1 dygn i rumstemperatur 4 dygn i kyl 6 veckor i frys <b>OBS!</b> Håll av plasman om provet ej analyseras samma dag Skydda provet från att exponeras för ljus
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall
Referensintervall	Se respektive analys
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	I undantagsfall
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	I profilen ingår: ALAT, Albumin, Alkaliska fosf., Bil.tot, Ca, Fosfat, GT, Kalium, Kreatinin, LD, Natrium, Urat och Urea
Medicinsk bakgrund/Indikation	Se respektive analys

## Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2022-11-18	07	Återaktivering. Lagt till rubrik revideringar.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet