


# Provtagningsanvisning Stickskada, misstänkt smittkälla - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

## Här ingår HIV, hepatit B och hepatit C

Remiss	<p>Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen under Mikrobiologi, Stickskada, Stickskada, misstänkt smittkälla. (Reservrutin pappersremiss, Remiss 3, Laboratoriemedicin Region Gävleborg.)</p> <p>För korrekt svarshantering ska Infektionsmottagningen alt företagshälsovård anges som beställare.</p>
Provtagning	<p>7 mL venblod i gelrör, gul propp. BD Vacutainer SST™ II Advance-rör art.nr. 366566 Även 5 ml rör art. nr. 368498 kan användas.</p>  <p>Prov kan tas kapillärt. BD microtainer-rör med gel, gul propp art. nr. 365968</p>
Förvaring/transport	<p>Centrifugera och förvara provet kylt i väntan på nästa transport. Ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 24 h.</p>
Analyserande laboratorium	<p>Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle sjukhus</p>
Referensintervall	<p>Negativt svar</p>
Svarstid	<p>Analysen utförs helgfria vardagar. Prover som anländer till lab före kl 12.00 vardagar, analyseras och besvaras innan kl. 12.00 nästa vardag.</p>
Ackrediterad	<p>Ja</p>
Efterbeställning	<p>Se provtagningsanvisningar för HIV, Hepatit B och Hepatit C.</p>
Patientinformation	<p>Ej tillämpligt</p>

Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	Beställs som ”Stickskada, misstänkt smittkälla, se <a href="#">Stick- och skärskador samt blodstänk. Åtgärder och handlingsprogram</a>
Medicinsk bakgrund/indikation	Se provtagningsanvisningar för HIV, Hepatit B och Hepatit C.  Tas vid stick- och skärskador samt blodstänk.

## Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-02-24	7	Återaktivering. Lagt till rubrik revideringar. Förtydligat beställning med elektroniska remisser.
2023-05-04	8	Ändrat till Remiss 3
2024-04-03	9	Tar bort rekommendation av rör utan gel (röd propp) vid provtagning då de ej kommer att kunna centrifugeras på p471 i den nya automationen pga. lägre rekommenderat g-tal. Lägger till rörtyp och art. nr. för provtagning.

Kopians giltighet garanteras utskriftsdatumet