

Provtagningsanvisning Sporprov (sterilitetskontroll) - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Sporprov (sterilitetskontroll)	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Sporprov (sterilitetskontroll)

Remiss	Beställning görs på pappersremiss, Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg. Hittas under Sterilkontroller, Sporprov Ange gärna på remissen, klinisk data: - Instrumentets ID-nummer samt steriliseringsmetod (ex torrvarme, ånga, osv) - Ampull-/stripsnummer om flera sporprover tas - Telefonnummer och datum - Om det är en validering som pågår eller kontroll
Provtagning	<u>Provtagningskit</u> • Sporview Self-contained Biological Indicators For monitoring Steam/SporView Steam Self-contained BI (Crosstex, SCS-100): <i>Geobacillus stearothermophilus</i> – Ampull för ångautoklav • Biological Indicator Spore Strips For Monitoring Dry Heat (Crosstex, BG-106): <i>Bacillus atrophaeus</i> – Strips för torrsterilisator (OBS! Förvaras torrt och mörkt mellan 15°C och 30°C) <u>Provtagningsförfarande</u> • Placera ampuller/stripsen i sterilisator på ställen som är svåra att sterilisera (enligt valideringsprotokollet eller lokala skriftliga rutinen). Packa på samma sätt som övriga gods (ex inuti dukarna, linda in i papper, direkt, m.m.). • Ta EJ isär varken ampullerna eller stripsen! • Kör steriliseringsprogrammet enligt sedvanliga rutinerna. • Ta ut ampullerna/stripsen, låt dem svalna lite. Tryck INTE ner korken på ampullerna. • Kryssa i på remissen där det står sporprover, längst ner i högra hörnet under Sterilkontroller och klistra motsvarande etikett som heter SE och sitter på baksidan av remissen på proverna. • Inga personnummer behöver ges på remissen utan det räcker med avsändare, beställare och deras adress inklusive telefonnummer och datum. • Har man fler än en ampull/strips så numrera gärna ampullerna/stripsen och autoklavbeteckning på remissen under klinisk data t.ex. Nr. 1 längst in och Nr. 2 längst ut osv. • Proverna skickas till Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin, Region Gävleborg, 801 87 Gävle.

Instruktion

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Sporprov (sterilitetskontroll) - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

3(3)

Dokument ID: 09-891640

Giltigt t.o.m.: 2026-09-17

Revisionsnr: 1

Förvaring/transport	• Stripsar (torrsterilisator) förvaras i rumstemperatur. • Ampullerna förvaras i kyl eller i rumstemperatur inför transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk mikrobiologi, Gävle sjukhus
Referensintervall	Sterilt – osterilt
Svarstid	Osterila prover meddelas per telefon till kunden och besvaras omgående.
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Provet kan efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Ej tillämpligt
Medicinsk bakgrund/indikation	Biologisk kontroll av steriliseringsprocesser som en del i SIS-TR 46:2014.

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvarig samt granskad av medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-09-10	1	Nytt dokument utifrån uppdaterad dokumentstyrning. Ersätter dok. 09-71286. Flyttat viktig information att ange på remissen till rubrik remiss.