


## Provtagningsanvisning Bilirubin i övriga kroppsvätskor - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem inom Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg (skriv för hand under övriga analyser)
Provtagning	Na- eller Li -Heparinrör utan gel, grön propp 
Förvaring/Transport	Transport till analyserande lab samma dag <b>OBS!</b> Skydda provet från att exponeras för ljus Provet centrifugeras på Klinisk Kemi före analys Centrifugerat prov hållbart 1 dygn i rumstemperatur 7 dygn i kyl 6 månader i frys
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Kemi i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall
Referensintervall	Referensintervall för Bilirubin i diverse vätskor saknas
Svarstid	Dagligen
Akrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Ej tillämpligt
Medicinsk bakgrund/Indikation	Vid misstanke om galläckage

## Revideringar

Datum	Revisionsnummer	Ändring
2023-07-10	5	Lagt till rubriken revideringar. Ändrat benämning i titel från "D-Bilirubin" till "Bilirubin". Uppdaterat under förvaring.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet