

Provtagningsanvisning Influenta A, B, RSV och SARS-COV2 akut PCR - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Influenta A, B, RSV och SARS COV-2 akut PCR	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Influensa A, B, RSV och SARS COV-2 akut PCR

Remiss	OBS! Denna analys ska endast beställas då akut beslutsunderlag behövs. Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Luftvägsdiagnostik. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboriemedicin Region Gävleborg) Vid beställning på pappersremiss skriv "akutanalys" i anamnesrutan, provmaterial och insjuknandedatum.)
Provtagning	I första hand rekommenderas att ett prov per patient tas från nasofarynx och bakre svalgvägg. Följande provtagningsmaterial accepteras: Flockad pinne i sterilt rör med 3 mL fysiologisk koksalt (använd samma pinne för provtagning av både nph och svalg) Vid brist på flockade pinnar kan E-swab användas. Alternativt kan nasofarynxaspirat tas. Prov tas i sterilt plaströr, i slemsamlare med sug och tunn kateter. Artikel och artikelnummer: Flockad pinne, artikelnr 201508 (Procedo) Sterilt plaströr med skruvkork, artikelnr 231202 (Procedo) Virocult, artikelnr 201361 (Onemed) E-swab, blå, NPH, artikelnr 201520 (Procedo) Sugset, artikelnr 215390 (Procedo) Sugkateter, artikelnr 286345 (Procedo) Sugslang med kona och nippel, artikelnr 220382 (Procedo)
Förvaring/transport	Transporteras snarast till laboratoriet. Förvaras kylt i väntan på transport. Transport utanför laboratoriet sker i kyla.
Analyserande laboratorium	Klinisk kemi Gävle sjukhus, Hudiksvalls sjukhus och Bollnäs sjukhus
Referensintervall	Påvisat/Ej påvisat
Svarstid	1 ½ - 2 timmar
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kontakta laboratoriet om detta önskas
Patientinformation	Ej tillämpligt.

Instruktion

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Influenta A, B, RSV och SARS-COV2 akut PCR - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

3(3)

Dokument ID: 09-909099

Giltigt t.o.m.: 2026-10-28

Revisionsnr: 1

Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	Metoden är en PCR där fyra virus detekteras samtidigt; SARS-CoV2. Influenta A, Influenta B och RS-virus. Analys av enskilda virus utförs ej med denna metod.
Medicinsk bakgrund/indikation	Indikation: Misstanke om infektion orsakad av SARS-CoV-2, Influenta A/B eller RSV.

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvarig samt granskad av medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-10-14	1	Nytt dokument anpassat utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok. 09-519403. Ändrat journalsystem och lagt till sökväg i Cosmic.