


Andningsmask SR 100 och filter - användning, rengöring och desinfektion enligt tillverkarens rekommendation

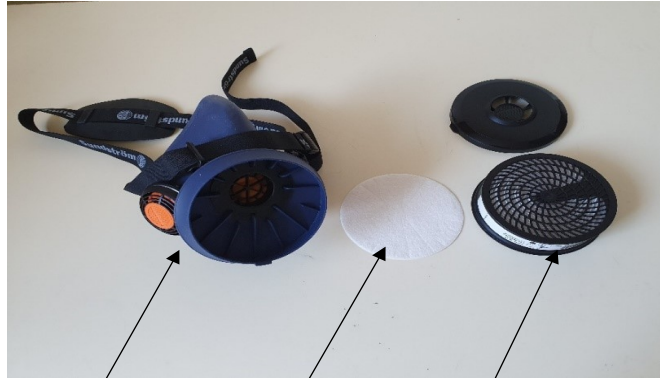

Andningsmask (SR 100)

Förfilter (SR 221)

Partikelfilter (SR 510 P3 R)

- **Partikelfilter SR510 ska användas**
- **Förfilter SR 221 behålls**
- **Gasfilter nr SR 217 ska kastas**

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Vid vård hos patient med misstänkt eller bekräftad luftvägssmitta t.ex. TB, mässling, vattkoppor eller vid dropp-kontaktsmitta, aerosolgenererande procedurer vid covid-19.
- Inte lämplig vid source control.
- Andningsmask och filter är personbundna.

UTPROVNING OCH ANVÄNDNING

- Partikelfiltret märks med namn och datum när det tas i bruk första gången.
- Masken provas före användning så att den är tät och inte läcker från sidorna.
- Var särskilt noggrann med utprovningen om du bär skägg eller har en ovanlig ansiktsform.

[Länk till Sundströms video för tillpassning av mask– youtube.](#)

BYTE AV FILTER

I kombination med långt visir som täcker filtret gäller:

- Pre-filter (SR 221) byts efter **7 arbetspass**. Med ett arbetspass menas ett pass då du frekvent använder andningsmasken.
- Partikelfilter (SR 510 P3 R) byts om det blir tungt att andas igenom det eller tidigare om filtret skadas, utsatts för kroppsvätskor eller smuts samt får ett ökat andningsmotstånd. Filtret kan återanvändas i minst 12 månader efter desinfektion om det är oskadat i övrigt.
- Extra filter beställs via din kundansvarig för förrådet eller via e-post: inkop@regiongavleborg.se

Beskrivning

Dokumentnamn: Andningsmask SR 100 och filter - användning, rengöring och desinfektion enligt tillverkarens rekommendation 2(3)

Dokument ID: 09-467118

Giltigt t.o.m.: 2025-01-25

Revisionsnr: 6

Del 1 Daglig rengöring efter användning

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV SILIKONMASK MED TILLHÖRANDE FILTER

1. Desinfektera händerna
2. Ta på skyddshandskar.
3. Efter användning torkas alla delar på andningsmasken samt utsidan på partikelfiltret, noggrant av med yt-desinfektionsmedel med rengörande effekt använd engångs torkduk microfiber.
4. Därefter lufttorkas delarna.
5. Ta av skyddshandskar.
6. Desinfektera händerna
7. Andningsmasken förvaras mellan användningarna i medföljande förpackning som desinfekteras innan man lägger i masken. Förpackningen ska vara märkt med namn på användaren.

Del 2 Omfattande rengöring och alkoholbaserad desinfektion vid behov t.ex. 1 gång/vecka

Andningsmasken ska rengöras i 70% etanolsprit vid behov t.ex. 1 gång/vecka. Innan påbörjad desinfektion ska del 1 (se ovan) alltid genomföras.

1. Använd handdesinfektion innan rengöring av andningsmask påbörjas och handskar tages på.
2. Inför denna desinfektion så tar du bort partikelfiltret och alla löstagbara delar från ansiktsmasken (se bilden). Använd skyddshandskar.
3. Använd handdesinfektion efter rengöring av ansiktsmasken avslutats och handskar tagits av.

Beskrivning

Dokumentnamn: Andningsmask SR 100 och filter - användning, rengöring och desinfektion enligt tillverkarens rekommendation

3(3)

Dokument ID: 09-467118

Giltigt t.o.m.: 2025-01-25

Revisionsnr: 6



4. Handdesinfektion innan handskar tages på.
5. Använd skyddshandskar för att undvika kontakt med 70% etanolsprit.
6. Placera partikelfilter och ansiktsmasken i 70% etanolspritbad, hela partikelfiltret och ansiktsmasken och alla löstagbara delar ska vara helt nedsänkt i 70% etanolsprit i minst 5 minuter, lyft sedan upp filtret och skaka ut överbliven 70% etanolsprit. Låt sedan partikelfiltret och ansiktsmasken ligga och lufttorka i minst 30 minuter. Partikelfiltret ska ligga med den täckta sidan uppåt, så överbliven 70% etanolsprit har möjlighet att rinna ut. Om man har två partikelfilter kan man byta dem med varandra.
7. Handdesinfektion efter att handskar tagits av.
Observera att mycket längre tid i etanol än angivet kan försämra hållbarheten.
8. Desinfektera händerna innan du påbörjar ihop monteringen av ansiktsmasken samt mellan varje arbetsmoment så att inte ansiktsmasken kontamineras.
9. Efter att ansiktsmasken har torkat i minst 30 minuter (på ett rent ställe där inte det finns risk för kontaminering av masken under tork tiden.), så sätter du på nytt förfilter på ansiktsmasken om det använts i en vecka (7 arbetspass), och sätt på partikelfiltret.
10. Andningsmasken förvaras mellan användningarna i medföljande förpackning som desinfekteras innan man lägger i masken. Förpackningen ska vara märkt med namn på användaren.