


Provtagningsanvisning Gravidscreening - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Gravidscreening	Dokumentkategori: Instruktion	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	Dokumentansvarig: Kvalitetssamordnare KML	Beslutsinstans: Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		Datum för översyn: Se giltigt t.o.m.

Här ingår HIV, Hepatit B (HBs-ag), Hepatit C (HCV-ak) och Syfilis

Remiss	<p>Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Smittester → Gravidscreening. Alt. hittas via sökfunktionen.</p> <p>Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 3, Laboratoriemedicin Region Gävleborg)</p>
Provtagning	<p>7 mL venblod i gelrör, gul propp. BD Vacutainer SST™ II Advance-rör art.nr. 366566</p>  <p>Prov kan tas kapillärt. BD microtainer-rör med gel, gul propp art. nr. 365968</p>
Förvaring/transport	Centrifugera och förvara provet kylt i väntan på nästa transport. Ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 24 h.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Analysen utförs vardagar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kontakta laboratoriet om efterbeställning önskas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/övrig upplysning	<p>Besvaras negativt eller positivt.</p> <p>Tolkning följer alltid med svaret när någon analys är positiv.</p>
Medicinsk bakgrund/indikation	<p>Se enskilda provtagningsanvisningar för Hepatit B, Hepatit C, HIV och Syfilis.</p> <p>Gravidscreening enligt föreskrifter (SOSFS 2004:13).</p>

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben ([Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg](#)).

Medverkande och granskare

Dokumentet är framtaget i samarbete med och granskat av metodansvarig samt granskat av medicinskt ansvarig. Revision 1 av detta dokument även granskat av Systemadministratör CGM Analytix.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-03-19	1	Nytt dokument anpassat utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok 09-79491. Ändrat till elektronisk remiss Cosmic.
2025-12-02	2	Uppdaterat trivialnamn enligt nya rekommenderade rapportnamn.