



## Provtagningsanvisning Plasma för frysning - Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen under Mikrobiologi, Frysning, Frysprov plasma. (Reservrutin pappersremiss, Remiss 3, Laboratoriemedicin Region Gävleborg.)
Provtagning	<p>Välj provtagningsrör utifrån provtagningsändamål, enligt aktuell provtagningsanvisning.</p> <p>5 mL, Li-Heparin, gelrör, mintgrön propp BD Vacutainer PST™ II-rör art. nr. 368497</p>  <p>eller</p> <p>5–7 mL EDTA-rör, lila propp BD Vacutainer K<sub>2</sub>-EDTA-rör art. nr. 367864 eller art. nr. 368861</p>  <p>Viktigt! Det är av yttersta vikt att EDTA-provrör används 8–10 gånger direkt efter provtagning för att undvika koagel i röret.</p>
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Ej tillämpligt
Akrediterad	Ej tillämpligt
Efterbeställning	Ja, inom ett år. Kontakta laboratoriet om efterbeställning önskas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja

Kommentarer/övrig upplysning	Provet förvaras fryst (-70 °C) i ett år
Medicinsk bakgrund/indikation	Ej tillämpligt

## Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-04-24	3	Lagt till rubrik revideringar. Förtydligat beställning med elektroniska remisser.
2024-04-03	4	Lagt till art. nr för rekommenderade rörtyper för provtagning. Nya bilder på provrör från Proceedo.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet