


## Export av foto/video från Picsara till USB-minne

- Sätt in ett tomt USB-minne
- Från Melior – Sök upp patient som det gäller
- Gå till Externa program – klicka på Picsara
- Klicka på ”sök case för denna vårdenhet” eller ”sök case för alla vårdenheter”
- Klicka OK, då kommer casen upp
- Dubbelklicka på caset i listan till vänster


### Alla bilder/video i caset ska sparas:

(om endast vissa bilder/video i caset ska sparas, läs längre ner)

- Klicka på Case
- Klicka på Exportera media...

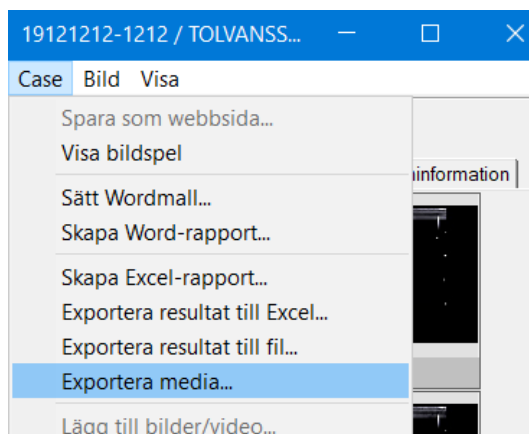

- Välj USB-minnet under ”Den här datorn”
- Bekräfta med OK

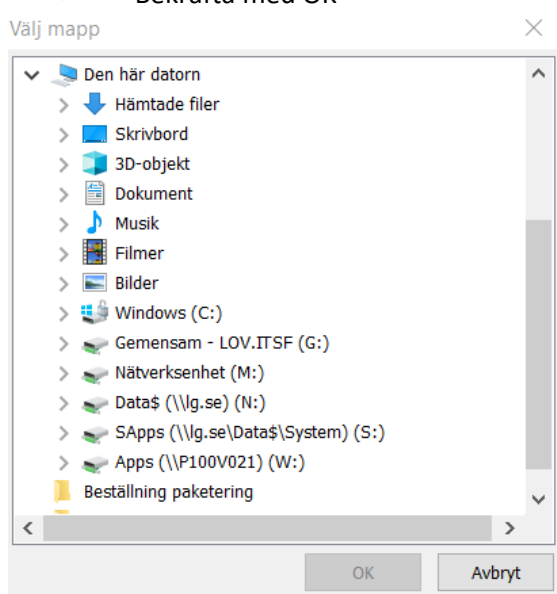

- Välj "Exportera alla filer"

Bocka även i "Annoteringar" och "Mätningar" om dessa är relevanta att ha med

- Bekräfta med OK

Filerna laddas nu upp till USB-minnet (kan ta tid om det är video)




Gå till utforskaren, leta upp USB-minnet.

Kontrollera att filerna laddats upp


KLART!

### Vissa bilder/video i caset ska sparas:

- Håll in Ctrl knappen och markera aktuella bilder.
- Klicka på Case
- Klicka på Exportera media...

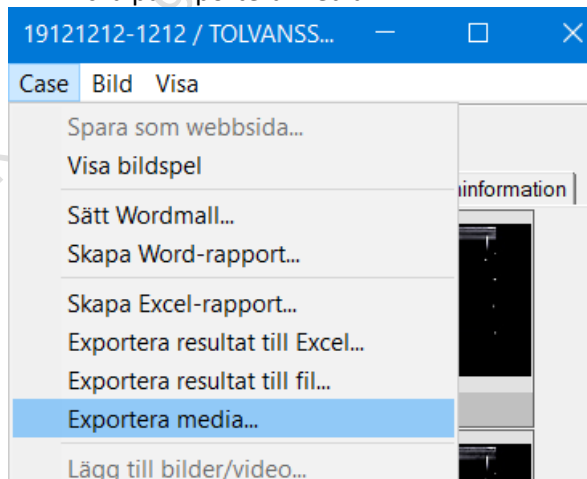

- Välj USB-minnet under "Den här datorn"
- Bekräfta med OK

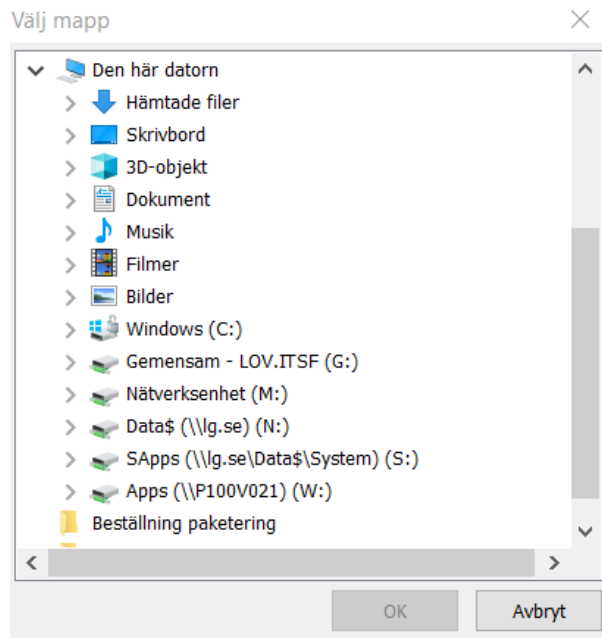

- Välj "Exportera valda filer"
  - Bocka även i "Annoteringar" och "Mätningar" om dessa är relevanta att ha med
  - Bekräfta med OK
- Filerna laddas nu upp till USB-minnet (kan ta tid om det är video)



Gå till utforskaren, leta upp USB-minnet.  
Kontrollera att filerna laddats upp.  
KLART!