

Provtagningsanvisning Histologi Bröst - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller remiss PAD histopatologi .
Provtagning	<p>Mellan kl 8:00 och 15:30 helgfri måndag-fredag. Efter kl 15:30 när patologlabb är stängt, vänd korkplattan upp och ned och fyll på med formalin (10x vävnadsmängden). Viktigt att preparatet täcks av formalin för att undvika vävnadsautolys. <u>OBS! Inga färska preparat dagen innan långhelg!</u> Preparatet måste komma till laboratoriet inom 1 timme efter provtagningen (inkl. röntgen).</p> <p>Mastektomipreparat Ange på remissen om ingreppet görs p.g.a. palpabel tumör eller mammografiskt fynd, indikerad. Markera preparatet med kort sutur kranialt och lång sutur lateralt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beskriv hur suturerna sitter • Ange tumörens läge och storlek i förhållande till mamillen, klockslag, sidoangivelse. Ange om det finns flera tumörer. <p>Mammografiskt fynd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förtätning • Förekalkning – mikro • Storlek • Läge i förhållande till mamillen • Kod <p>Nåla upp preparatet på korkskivan med bröstschablonen (höger respektive vänster) inritat. Viktigt! Montera mastektomin på bröstschablonen på samma sätt som det satt i patientens bröst. Använd nålar med färgade huvuden för att markera respektive resektionsrand, för detta är viktigt vid radikalitetsbedömning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kranialt – gul • Kaudalt – grön • Vänster – röd • Höger – blå

Provtagning	<p>Sektorresektat</p> <p>Markera preparatet med kort sutur kranialt och lång sutur lateralt</p> <ul style="list-style-type: none">• Beskriv hur suturerna sitter• Ange tumörens läge och storlek i förhållande till indikeringsnålen, klockslag, sidoangivelse. Ange om det finns flera tumörer. <p>Mammografiskt fynd</p> <ul style="list-style-type: none">• Förtätning• Förkalkning – mikro• Storlek• Läge i förhållande till indikeringsnålen• Kod• Markör <p>Nåla upp preparatet på korkskivan med bröstschablonen (höger respektive vänster) inritat. Viktigt! Montera sektorresektatet på bröstschablonen på samma sätt som det satt i patientens bröst. Använd nålar med färgade huvuden för att markera respektive resektionsrand, viktigt vid radikalitetsbedömning</p> <ul style="list-style-type: none">• Kranialt – gul• Kaudalt – grön• Vänster – röd• Höger – blå <p>Lägg det uppnålade preparatet i uppmärkt hink och gå omedelbart till mammografin för preparatröntgen. Papperssvar ska lämnas samtidigt som preparatet.</p> <p>Utvidgade excisioner</p> <p>Markera preparatet med kort sutur kranialt och lång sutur lateralt</p> <ul style="list-style-type: none">• Beskriv hur suturerna sitter• Ange tumörens läge och storlek i förhållande till indikeringsnålen, klockslag, sidoangivelse.• Markör <p>Nåla upp preparatet på korkskivan med bröstschablonen (höger respektive vänster) inritat. Viktigt! Montera preparatet på bröstschablonen på samma sätt som det satt i patientens bröst. Använd nålar med färgade huvuden för att markera respektive resektionsrand, viktigt vid radikalitetsbedömning</p>
-------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Kranialt – gul • Kaudalt – grön • Vänster – röd • Höger – blå <p>Lägg det uppnålade preparatet i uppmärkt hink och gå omedelbart till mammografen för preparatröntgen, om det behövs.</p> <p>OBS! Om preparatet inte behöver orienteras, får det skickas i formalin utan suturer.</p>
Förvaring/Transport	<p>Efter kl 15:30 vänd korkplattan upp och ned och fyll på med formalin (10x vävnadsmängden). Viktigt att preparatet täcks av formalinet för att undvika vävnadsautolys.</p> <p>Vid mastektomipreparat som är tjockare än 4 cm borde snittas 2 vertikala snitt på baksidan.</p> <p>OBS! Undvik tumörområdet! I detta fall lägg bara gasväv mellan preparatet och korkplattan.</p>
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Upp till 20 arbetsdagar
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Vid eventuella efterbeställningar, kontakta Patologlabb
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Inga övriga kommentarer
Medicinsk bakgrund/Indikation	<p>Operationspreparat från bröst (sektorresektat, mastektomi) analyseras mikroskopiskt avseende förekomst av precancerösa förändringar och cancer. Vid cancer karaktäriseras denna enligt riktlinjer i det nationella vårdprogrammet för bröstcancer, TNM, WHO och KVASt. Indikation för provtagning är bröstcancer.</p>

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-08-05	7	Lagt till rubrik "Revideringar" samt denna tabell. Tillagt hur man ska markera och beskriva preparaten (mastektomi och sektorresektat)
2024-04-09	8	Lagt till " <u>OBS! Inga färsk preparat dagen innan långhelg!</u> ". Fixat trasig remisslänk.
2024-05-30	9	Ändrat texten under mastektomipreparat, sektorresektat, ändrat under Förvaring och Transport och lagt till Utvidgade excisioner. Ändrat granskare, slutgranskare och fastställare.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdokumentet