


Provtagningsanvisning Glukos i övriga kroppsvätskor - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss i Region Gävleborg (skriv för hand under övriga analyser)				
Provtagning	<p>PD-vätska i plaströr med skruvkork.</p> <p>Övriga kroppsvätskor: 5 mL Na-hep.flourid, grå propp.</p> 				
Förvaring/Transport	<p>Ocentrifugerat prov bör vara laboratoriet tillhanda inom 2 timmar.</p> <p>Centrifugera provet inom 2 timmar efter provtagning.</p> <p>Avhällt prov hållbart</p> <table style="margin-left: 150px;"> <tr> <td>1 dygn i rumstemperatur</td> </tr> <tr> <td>3 dygn i kyl</td> </tr> </table>	1 dygn i rumstemperatur	3 dygn i kyl		
1 dygn i rumstemperatur					
3 dygn i kyl					
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs.				
Referensintervall	Ej applicerbart.				
Svarstid	Dagligen				
Ackrediterad	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>PD-vätska</td> <td>Ackrediterad</td> </tr> <tr> <td>Övriga kroppsvätskor</td> <td>Ej ackrediterad</td> </tr> </table>	PD-vätska	Ackrediterad	Övriga kroppsvätskor	Ej ackrediterad
PD-vätska	Ackrediterad				
Övriga kroppsvätskor	Ej ackrediterad				
Efterbeställningar	Ej tillämpligt.				
Patientinformation	Ej tillämpligt.				
Biobanksprov	Nej				
Kommentarer/Övrig upplysning	Ej tillämpligt.				
Medicinsk bakgrund/indikation	<p>Vid misstanke bakteriell infektion.</p> <p>Information saknas.</p>				

Revideringar

Datum	Revisionsnummer	Ändring
2022-09-26	10	Återaktivering. Lagt till rubriken revideringar.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet