


Provtagningsanvisning Kristaller, Ldv- Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller Konsultremiss.
Provtagning	6 mL Na-heparinrör utan gel , grön propp 
Förvaring/transport	Provet hållbart 1 vecka i kyl
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle
Referensintervall	Inga fynd av kristaller
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Ej tillämpligt
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	EDTA-rör kan ej användas, kristallerna upplöses. Li-heparinrör kan ej användas eftersom litiumheparin kan utfällas som pyrofosfatliknande kristaller.
Medicinsk bakgrund/indikation	Indikation: Vid diagnostik av kristallinducerad artrit såsom gikt och pyrofosfatartrit. Närvaro av intracellulära kristaller (urat eller kalciumpyrofosfat) styrker diagnosen kristallinducerad artrit men ett negativt fynd utesluter inte denna diagnos. Anmärkning Kortikosteroidpreparat för intraartikulärt bruk innehåller dubbelbrytande kristaller som ibland kan iakttas i ledvätska efter upprepande injektioner under lång tid. Denna felkälla måste beaktas vid kristallanalysen.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2024-01-03	3	Lagt till rubrik revideringar. Ny granskare. Ny fastställare. Lagt till extra uppföljare.
2024-10-24	4	Ny upprättare. Mindre justering av titel enligt harmonisering av benämning utifrån rekommenderat rapportnamn.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet