

Provtagningsanvisning Bilirubin totalt i plasma - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Region Gävleborg		
Provtagning	5 mL Li-Heparin, gelrör, mintgrön propp  Kan tas kapillärt Minsta blodmängd 0,5 mL (150 µL plasma)		
Förvaring/Transport	Centrifugera provet inom 4 timmar från provtagning Centrifugerat prov hållbart 1 dygn i rumstemperatur 7 dygn i kyl 6 månader i frys (-15)–(-25) °C OBS! Skydda provet från att exponeras för ljus		
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs		
Referensintervall	< 14 dagar	< 284	µmol/L
	14 dagar–1 månad	< 50	µmol/L
	1 månad–5 år	< 8	µmol/L
	6 år–10 år	< 18	µmol/L
	≥ 11 år	< 25	µmol/L
Svarstid	Dagligen		
Ackrediterad	Ja		
Efterbeställning	I undantagsfall inom 4 timmar		
Patientinformation	Provtagning ska ske på morgonen pga. dygnsvariation.		
Biobanksprov	Nej		
Kommentarer/Övrig upplysning	Hemolys kan ge felaktigt värde. Unga män kan ha upp till 30 µmol/L.		

	okonjugerat bilirubin Gilberts syndrom neonatal ikterus Crigler-Najjars syndrom Lever- och gallvägs- sjukdomar konjugerat bilirubin
--	---

Revideringar

Datum	Revisionsnummer	Ändring
2023-07-10	12	Lagt till rubriken revideringar. Ändring under förvaring.