


Provtagningsanvisning Laktat i övriga kroppsvätskor – Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem inom Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg (skriv för hand under övriga analyser)
Provtagning	5 mL NaF/KOxalat rör (rekommenderas) eller Hep-Fluorid rör, grå propp. Ska tas på is. 
Förvaring/Transport	OBS! Transportera provet omedelbart på is till enheten för Klinisk Kemi Förvara provet på isbad och centrifugera inom 30 minuter efter provtagning. Överför till ett plaströr om analys inte sker i nära anslutning till centrifugering. Ledvätska kan förvaras i 5 timmar vid 2–8 °C. Frys vid längre förvaring.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs
Referensintervall	Aseptisk artrit 0,5–6,6 mmol/L Septisk artrit 8,0–14,0 mmol/L
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Ej tillämpligt
Medicinsk bakgrund/Indikation	Vid misstänkt artrit

Revideringar

Datum	Revisionsnummer	Ändring
2023-07-10	8	Lagt till rubriken revideringar.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet