


Provtagningsanvisning Trombocyter i citratrör, B- Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg. Vid beställning på en äldre pappersremiss skriv "TPKC" på tom rad under Hematologi. Märk provet med en av de extra etiketterna från remissens baksida.																											
Provtagning	<p>Na-citratrör, ljusblå propp 5 mL rör som drar 2,7 mL 5 mL rör som drar 1,8 mL</p>  <p>Kan inte tas kapillärt Na-citratröret ska vara fyllt inom volymmarkeringen.</p> <p>Viktigt! Det är av yttersta vikt att provrör vänds 8-10 gånger <u>direkt</u> efter provtagning för att undvika att trombocyterna aggregerar i röret.</p>																											
Förvaring/Transport	Na-citratröret ska vara analyserade lab tillhanda inom 4 timmar. Transporteras i rumstemperatur. Observera att röret INTE ska centrifugeras!																											
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs.																											
Referensintervall	<table border="1"> <tr> <td>1-7 d</td> <td>80-350</td> <td>x 10⁹/L</td> </tr> <tr> <td>8-14 d</td> <td>110-430</td> <td>x 10⁹/L</td> </tr> <tr> <td>15-30 d</td> <td>120-590</td> <td>x 10⁹/L</td> </tr> <tr> <td>31-60 d</td> <td>190-680</td> <td>x 10⁹/L</td> </tr> <tr> <td>61 d-5 mån</td> <td>150-650</td> <td>x 10⁹/L</td> </tr> <tr> <td>6 mån-10 år</td> <td>210-590</td> <td>x 10⁹/L</td> </tr> <tr> <td>11-17 år</td> <td>190-460</td> <td>x 10⁹/L</td> </tr> <tr> <td>K > 18 år</td> <td>165-387</td> <td>x 10⁹/L</td> </tr> <tr> <td>M > 18 år</td> <td>145-348</td> <td>x 10⁹/L</td> </tr> </table>	1-7 d	80-350	x 10 ⁹ /L	8-14 d	110-430	x 10 ⁹ /L	15-30 d	120-590	x 10 ⁹ /L	31-60 d	190-680	x 10 ⁹ /L	61 d-5 mån	150-650	x 10 ⁹ /L	6 mån-10 år	210-590	x 10 ⁹ /L	11-17 år	190-460	x 10 ⁹ /L	K > 18 år	165-387	x 10 ⁹ /L	M > 18 år	145-348	x 10 ⁹ /L
1-7 d	80-350	x 10 ⁹ /L																										
8-14 d	110-430	x 10 ⁹ /L																										
15-30 d	120-590	x 10 ⁹ /L																										
31-60 d	190-680	x 10 ⁹ /L																										
61 d-5 mån	150-650	x 10 ⁹ /L																										
6 mån-10 år	210-590	x 10 ⁹ /L																										
11-17 år	190-460	x 10 ⁹ /L																										
K > 18 år	165-387	x 10 ⁹ /L																										
M > 18 år	145-348	x 10 ⁹ /L																										
Svarstid	Dagligen																											

Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Ej tillämpligt
Medicinsk bakgrund/Indikation	Vid misstanke om pseudotrombocytopeni (aggregation av trombocyter) kan trombocyter i Na-citratrör analyseras.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-12-29	5	Lagt till rubrik revideringar. Ändrat analysen till ej ackrediterad. Ny fastställare.
2024-09-23	6	Mindre justering av titel enligt harmonisering av benämning utifrån rekommenderat rapportnamn.
2026-05-11	7	Tiden för när provet ska vara analyserande lab tillhanda har justerats till 4 timmar.