

Provtagningsanvisning bronksköljvätska, odling - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Aerob odling

Remiss	<p>Remiss: Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2 Mikrobiologi Laboratoriemedicin Region Gävleborg)</p> <p>Anamnes: Ange grundsjukdom, beskriv aktuella besvär, ev immunsuppression, antibiotikabehandling och ev allergi mot antibiotika.</p> <p>Vid misstanke om actinomykos, nocardios, brucellos eller tularemi ska detta alltid framgå på remissen. Vid misstanke om infektion med mykobakterier, legionella, chlamydophila eller mycoplasma, se separata provtagningsanvisningar.</p>
Provtagning	<p>Provtagningsmaterial Rör rund botten skruvlock 10ml Artikelnr i procedo: 1159356</p> <p>Prov tas i bronkträdet nedom trakea utan att bronkoskopspetsen kilas fast i en segmentbronk, varefter sköljning med kroppsvarm 0.9 % NaCl sker.</p>
Förvaring/transport	Transporteras omgående till laboratoriet, förvaras kylt i väntan på transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Slutsvar vanligen inom 2-3 vardagar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt

Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Kvalitativ odling. Växt av luftvägspatogener rapporteras med resistensbestämning. Bronksköljvätska ger ej skörd från lungvävnad såsom sker vid BAL och kontamineras ofta av bakterier från munhåla och svalg.
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstanke om bakteriellt orsakad nedre luftvägsinfektion.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-09-04	2	Tydligare beskrivning vad som ska anges under anamnes
2024-09-26	3	Bytt artikelnummer på provrör

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet