


## Provtagningsanvisning Blodstatus i helblod – Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg
Provtagning	<p>5 mL EDTA-rör, lila propp</p>  <p>Kan även tas kapillärt, lila propp Kapillär rör minst 250 µL och max 500 µL blod</p> <p>Viktigt! Det är av yttersta vikt att provrör vänds 8-10 gånger <u>direkt</u> efter provtagning för att undvika koagel i röret.</p>
Förvaring/transport	Hållbar 24 timmar i kyl
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs.
Referensintervall	Se respektive parameter
Svarstid	Dagligen
Akrediterad	Se respektive parameter
Efterbeställning	I undantagsfall
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	I profilen ingår: B-Hb, B-EPK, B-EVF, B-MCV, B-MCH, B-MCHC, B-RDW, B-LPK, B-TPK, B-MPV
Medicinsk bakgrund/indikation	Se respektive parameter